

Jednorazové ochranné rúško na ústa

Popis:

Obdĺžnikové ochranné rúško

Veľkosť : 17,5 * 9,5cm

Balenie: 50 ks

Farba: Modrá

Zloženie: Mikrovlákno

Dátum výroby: 2020-03-12

Dátum spotreby: 2 roky

Použitie:

1. Pred nasadením rúška si umyte ruky
2. Uchopte šnúrky obomi rukami a nasadte si rúško tak aby modrá časť rúška smerovala smerom od tváre a biela časť smerom k tvári.
3. Priložte vrchnú časť rúška (s bielym pásikom) smerom na nos a zovrite pásik podľa vlastnej veľkosti, prispôsobte rúško tvári. Rúško úplne zakrýva ústa.
4. Rúško je potrebné vymeniť cca. Každých 8 hodín a nie je možné ho opätovne použiť.

Informácie:

1. Ochranné rúško určené na jednorazové použitie.
2. Nepoužívajte rúško viac krát.
3. V prípade že je rúško poškodené nepoužívajte ho.
4. Nepoužívajte rúško v prípade že jeho spotreba presiahla 2 roky, pokiaľ, neprúdi vzduch, dýchanie nie je plynulé, alebo v prípade že sa ťažko dýcha.
5. V prípade alergie na netkané textílie rúško nepoužívajte.
6. Neodporúča sa používať pre malé deti, kvôli ich nižšej vitalite.
7. Nepoužívať počas spánku.